

راهنمای مختصر کاربردی

- ساختار دستگاه:



- مشخصات فنی دستگاه:



۱. فاصله مناسب تا پوست برای عملکرد بهتر دستگاه: ۲۹ الی ۳۱ سانتی متر
۲. میزان روشنایی: ۳۰۰ lux الی ۱۰۰۰ lux
۳. وزن خالص: ۰.۳ کیلوگرم
۴. میزان مقاومت در برابر نفوذ ذرات معلق و آب: IPX0
۵. عمر مفید باتری LED: ۱۰۰,۰۰۰ ساعت

- راه اندازی دستگاه:

۱. کلید پاور دستگاه را فشار داده و رها کنید. سپس دستگاه شروع به کار خواهد کرد.
۲. پس از راه اندازی دستگاه، نشانگر باتری روشن می شود. با توجه به میزان شارژ باتری، این نشانگر دو رنگ را نشان می دهد: سفید و آبی. رنگ سفید نشان دهنده باتری با شارژ کامل و رنگ آبی نشان دهنده شارژ پایین باتری می باشد.
۳. از عملکرد صحیح نشانگر باتری و کامل بودن شارژ آن در زمان استفاده از دستگاه، اطمینان حاصل فرمایید. زمانیکه نشانگر باتری آبی است نشان دهنده این است که دستگاه باید شارژ شود. هنگامی که دستگاه در حال شارژ است، چراغ شارژ باتری شروع به چشمک زدن خواهد کرد. زمانیکه شارژ باتری کامل شود، چراغ شارژ خاموش می شود.



• تنظیم روشنایی تصویر:

۱. کلیدهای تنظیم روشنایی تصویر را لمس کنید تا روشنایی تصویر مطابق با نیاز شما تنظیم گردد. "  " به منظور افزایش روشنایی "  " به منظور کاهش روشنایی است.

• استراحت (Sleep) دستگاه:

۱. با لمس کلید استراحت، دستگاه به حالت استراحت یا Sleep خواهد رفت. در این حالت دستگاه تصویری را نشان نخواهد داد و انرژی باتری را ذخیره می‌کند. با لمس مجدد کلید استراحت، تصویر بازیابی می‌شود.

• خاموش کردن دستگاه:

۱. پس از استفاده، کلید پاور دستگاه را فشار دهید، دستگاه خاموش می‌شود و نشانگر باتری خاموش می‌شود.

• خطرات و هشدارهای عمومی:

۱. دو روش برای استفاده از دستگاه پیشنهاد می‌گردد. اولین روش این است که عمل رگ‌گیری و استفاده از دستگاه همزمان باشد. روش دوم این است که ابتدا با استفاده از مارکر موجود در پکیج دستگاه رگ‌ها را روی پوست علامت‌گذاری کرده و سپس شروع به رگ‌گیری شود.
۲. میزان روشنایی اتاق را در هنگام استفاده از دستگاه تنظیم کنید. این امر سبب بهبود عملکرد دستگاه می‌شود. همچنین از قرار دادن پوست در معرض نور مستقیم خورشید در هنگام استفاده از دستگاه بپرهیزید.
۳. برای ضدعفونی دستگاه می‌توانید از پارچه لطیف آغشته به صابون استفاده نمایید. از اسپری الکل و دیگر مواد ضدعفونی برای این کار اکیدا خودداری فرمایید.
۴. دستگاه ضدآب نیست. بنابراین از تماس آن با مایعات و استفاده از دستگاه با دستان خیس خودداری فرمایید.
۷. از نگاه کردن مستقیم به منبع نور دستگاه زمانیکه روشن است، بپرهیزید.
۶. بهتر است از استفاده از دستگاه در هنگام شارژ شدن خودداری فرمایید.
۷. بهتر است از استفاده از دستگاه در مجاورت دستگاه‌های با میدان مغناطیسی قوی نظیر دستگاه الکتروشوک بپرهیزید. چون ممکن است بر عملکرد دستگاه تاثیر نامطلوبی بگذارد.
۸. اگر قصد دارید به مدت طولانی از دستگاه استفاده نکنید، لطفاً آن را کامل شارژ کنید و در پکیج اورجینال دستگاه در یک محیط مناسب انبار کنید. همچنین از معکوس قرار دادن دستگاه و قرار دادن آن در زیر اجسام سنگین بپرهیزید. (شرایط محیطی مناسب برای انبارش: دما بین ۵ الی ۴۰ درجه سانتی‌گراد، رطوبت کمتر از ۸۰ درصد)



• گارانتی و خدمات پس از فروش:

دستگاه رگ‌یاب محصول کمپانی ZD Medical دارای ۱ سال گارانتی از زمان صدور فاکتور و ۱۰ سال خدمات پس از فروش بعد از اتمام گارانتی می‌باشد. اما گارانتی هرگونه مشکلی که ناشی از کاربر باشد را پشتیبانی نمی‌کند. تشخیص این گونه مشکلات بر عهده کارشناسان فنی شرکت می‌باشد. در زیر نمونه هایی از این مشکلات ناشی از خطای کاربری پیوست شده است:

- I. خرابی ناشی از سقوط ناگهانی دستگاه حین جابجایی و استفاده
 - II. خرابی ناشی از استفاده نادرست که مطابق با توصیه‌های این دفترچه نباشد.
 - III. خرابی ناشی از آسیب فیزیکی که باعث شکستن، ترک خوردن و خراشیدن دستگاه شود.
 - IV. خرابی ناشی از قرار گرفتن دستگاه در معرض گرما یا میدان مغناطیسی قوی
 - V. خرابی ناشی از ضدعفونی دستگاه با موادی نظیر الکل پزشکی و ...
- در صورت بروز مشکل می‌توانید با کارشناسان دپارتمان خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.

شرکت تجهیزات پزشکی رستاک طب پارسه

دپارتمان خدمات پس از فروش

تلفن شرکت: ۰۲۱-۲۲۲۶۰۵۷۳

وبسایت شرکت: www.rastakteb.com

ایمیل دپارتمان: aftersales@rastakteb.com

