


# Prime Syringe pump

## راهنمای مختصر کاربری

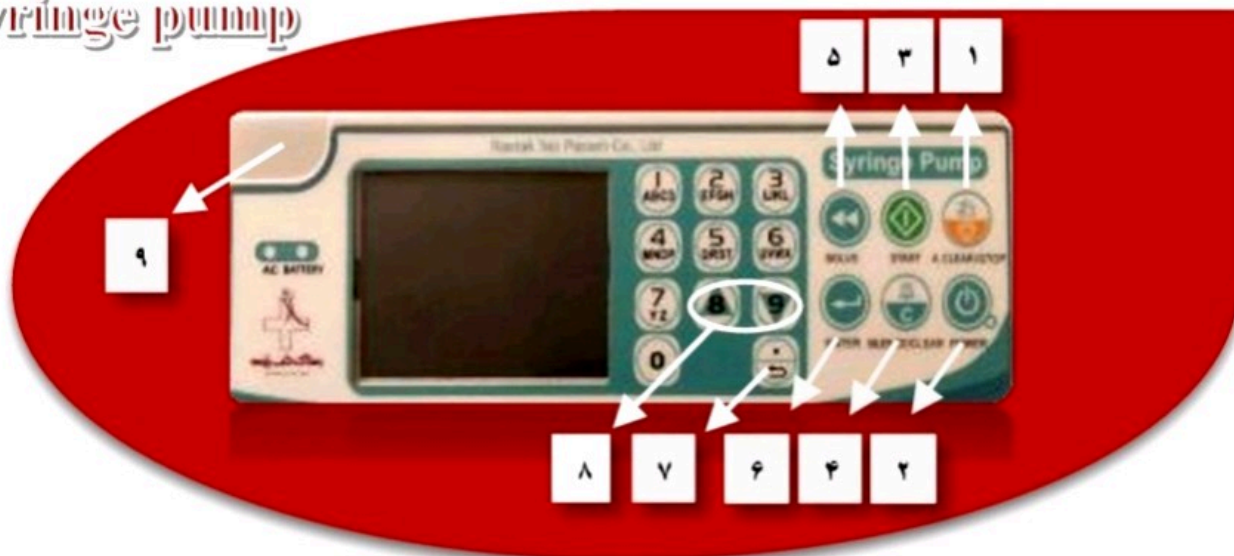

۶. تنظیم کردن پارامتر و ثبت مقادیر

۷. کلید بازگشت و نقطه اعشار

۸. کلید بالا و پایین

۹. چراغ نشانگر

۱. رفع کردن کلیه آلارم‌ها/ Stop

۲. روشن/خاموش کردن

۳. کلید Start

۴. بی صدا کردن آلارم/ پاک کردن پارامترها

۵. کلید بولوس

قبل از تزریق اطمینان حاصل شود که لبه سرنگ، داخل شیار ثابت لبه سرنگ قرار گرفته باشد.


بعد از نصب صحیح سرنگ مطمئن شوید که سایز و برند تشخیص داده شده (بالا سمت چپ نمایشگر) با سرنگ مورد استفاده یکسان باشد.

\*میتوان سرعت و یا هر پارامتر دیگری حین تزریق در حالت‌های مختلف را بدون توقف عملیات تغییر داد.

برای این کار در حین تزریق، کلید Enter را فشار دهید و مقدار پارامتر مورد نظر را تغییر دهید، سپس کلید Enter را برای ذخیره پارامتر فشار دهید. دستگاه تحت پارامتر جدید کار خواهد کرد.

### نحوه راه اندازی دستگاه:

کلید پاور را نگه‌داشته تا دستگاه روشن شود. سپس کلید  را فشار دهید تا دستگاه تست داخلی خود را انجام دهد. بعد از خودآزمایی آخرین حالت تزریق استفاده شده را نمایش می‌دهد.

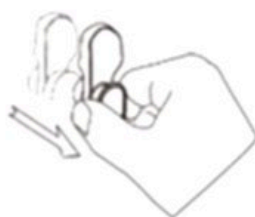

## حالت‌های تزریق

### :Rate Mode

- کلید ۱ را برای تنظیم سرعت تزریق فشار دهید. سپس کلید Enter را بزنید تا مقدار ثبت شود. اگر مقدار وارد شده اشتباه است کلید Clear را فشار دهید.
  - کلید ۲ را برای تنظیم VTBI (حجم مورد انتظار تزریق) فشار دهید. سپس کلید Enter را بزنید تا مقدار ثبت شود.
  - با فشردن کلید Start تزریق شروع می‌شود، هنگامی که تزریق به پایان رسید کلید Stop را فشار دهید تا "آلارم اتمام تزریق" حذف شود. سپس کلید نمایش داده شده مربوط به End injection را برای "پایان تزریق" فشار دهید.
- \*برای انتخاب حالت تزریق دیگر، کلید بازگشت به منو اصلی را فشار دهید.

### :Time Mode

- کلید ۱ را برای تنظیم VTBI فشار دهید. سپس کلید Enter را بزنید تا مقدار ثبت شود.
  - کلید ۲ را برای تنظیم زمان مورد نظر تزریق فشار دهید. سپس کلید Enter را بزنید تا مقدار ثبت شود.
- \*نرخ جریان بعد از تنظیم VTBI و زمان به طور خودکار محاسبه می‌شود.
- با فشردن کلید Start تزریق شروع می‌شود، هنگامی که تزریق به پایان رسید کلید Stop را فشار دهید تا "آلارم اتمام تزریق" حذف شود. سپس کلید نمایش داده شده مربوط به End injection را برای "پایان تزریق" فشار دهید.

### :Wt. Mode

- کلید ۱ را برای تنظیم وزن بدن بیمار فشار دهید. سپس کلید Enter را بزنید تا مقدار ثبت شود.
  - کلید ۲ را برای تنظیم مقدار دارو فشار دهید. سپس کلید Enter را بزنید تا مقدار ثبت شود.
  - کلید ۳ را برای تنظیم حجم دارو فشار دهید. سپس کلید Enter را بزنید تا مقدار ثبت شود.
  - کلید ۴ را برای تنظیم میزان دوز دارو فشار دهید. سپس کلید Enter را بزنید تا مقدار ثبت شود.
  - کلید ۵ را برای تنظیم VTBI فشار دهید. سپس کلید Enter را بزنید تا مقدار ثبت شود.
- \*مقدار دبی بعد از ثبت مقدار پارامترها به طور خودکار محاسبه می‌شود.
- با فشردن کلید Start تزریق شروع می‌شود، هنگامی که تزریق به پایان رسید کلید Stop را فشار دهید تا "آلارم اتمام تزریق" حذف شود. سپس کلید نمایش داده شده مربوط به End injection را برای "پایان تزریق" فشار دهید.



تهران، بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، پلاک ۱۳۳، واحد ۱

☎ ۰۲۱ ۲۲ ۲۶ ۰۵۷۳ ☎ ۰۹۳۸ ۳۹۰ ۶۴۵۱ 🌐 rastakteb.com